
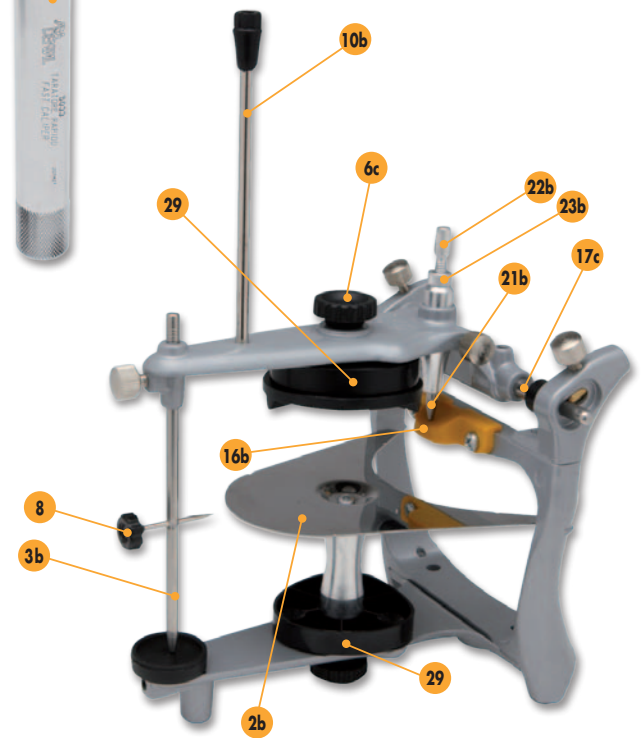
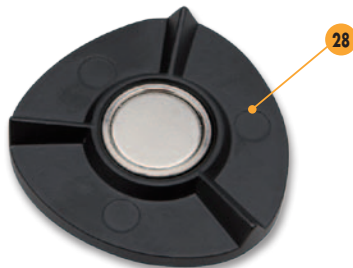
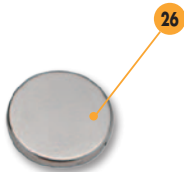
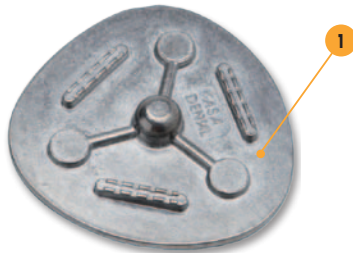
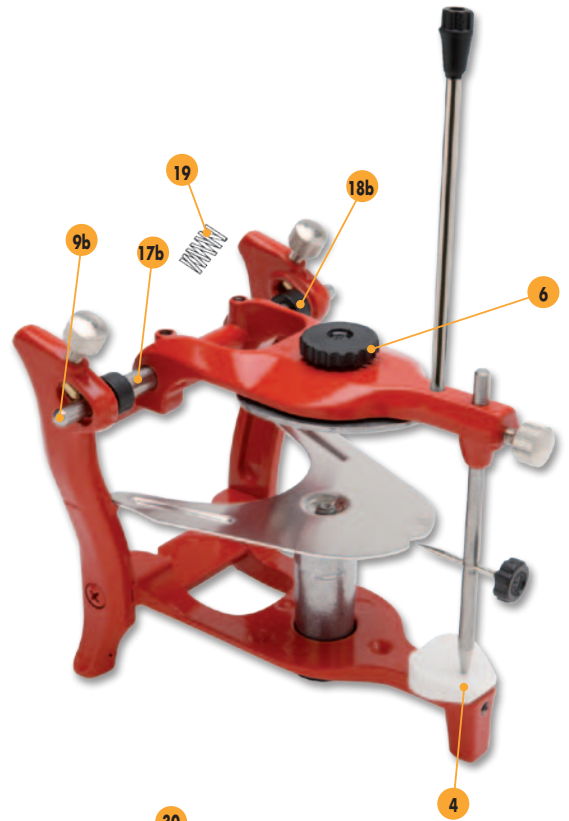


Артикуляторы

Articulators

Запасные части

Spare parts

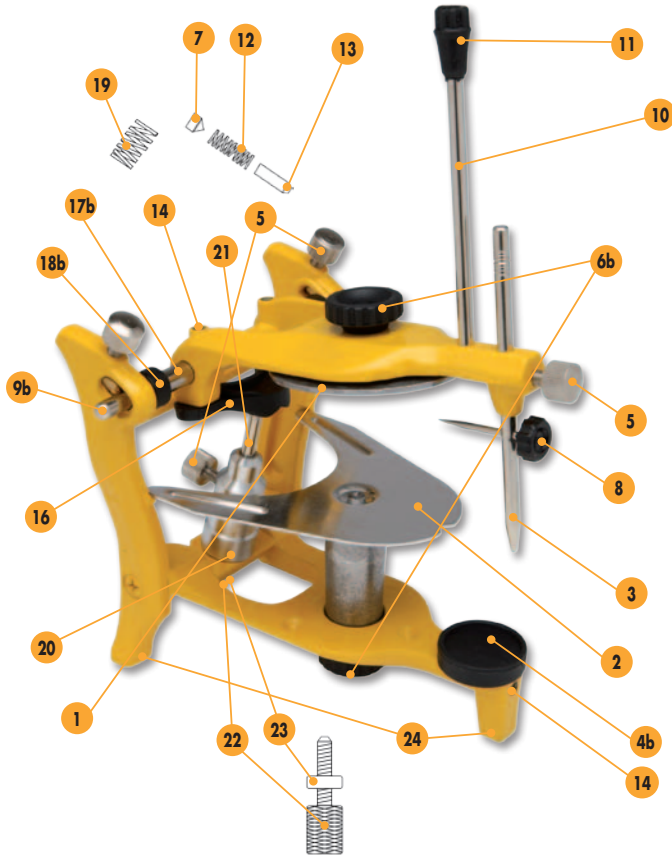

Винт для артикуляторов мод. 5030 - 5032 без прокладки
Screw for Articulators mod. 5030 - 5032 without spacer

Артикуляторы

Articulators

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / SPARE PART LIST


Описание	Коды/Code	5000	5010	5011	5030	5032	Description
1 Базовая пластина	5000-1	o	o	o	o	o	Mounting plate
2 Оклюзионный столик	5000-2	o	o	o	-	-	Occlusal table
2b Оклюзионный столик	5030-2	-	-	-	o	o	Occlusal table
3 Резцовый направляющий штифт	5000-3	o	o	o	-	-	Incisal guide rod
3b Резцовый направляющий штифт	5030-3	-	-	-	o	o	Incisal guide rod
4 Резцовый столик 10°	5000-4	o	o	-	o	-	Incisal table 10°
4b Круглая шайба резцового столика	5011-4	-	-	o	-	o	Round flat incisal table
5 Запирающие винты резцового столика и направляющего винта	5000-5	o	o	o	o	o	Incisal table and guide rod lock screws
6 Запирающие винты базовой пластины и столика	5000-6	o	o	-	-	-	Mounting plate and table lock screws
6b Винты базовой пластины и окклюзионного столика	5011-6	-	-	o	o	o	Mounting plate and occlusal table screws
6c Винты базовой пластины и окклюзионного столика с прокладкой	5030-6	-	-	-	o	o	Mounting plate and occlusal table screws with spacer
7 Запирающий винт регулируемой стороны	5000-7	o	o	o	o	o	Adjustable side shift lock screw
8 Резцовый индикатор	5000-8	o	o	o	o	o	Incisal indicator pin
*9 Винт бокового смещения	5000-9	o	o	-	-	-	Side shift screw
9b Винт бокового смещения	5011-9	o	o	o	o	o	Side shift screw
10 Опорная стойка для открывания на 180 градусов	5010-10	-	o	o	-	-	Bearing rod for 180° opening
10b Опорная стойка для открывания на 180 градусов	5030-10	-	-	-	o	o	Bearing rod for 180° opening
11 Резиновая защита штифта	5011-11	-	o	o	o	o	Rod rubber protection
12 Пружина бокового смещения	5000-12	o	o	o	o	o	Side shift spring
13 Цилиндр бокового смещения	5000-13	o	o	o	o	o	Side shift cylinder
14 Винт М5 для фиксации резцового столика	5000-18	o	o	o	o	o	M5 screws for incisal table fixing
16 Контрастная наклонная поверхность	5011-16	-	-	o	-	-	Contrast inclined plane
16b Контрастная наклонная поверхность	5032-16	-	-	-	-	o	Contrast inclined plane
*17 Штифт	5000-17	o	o	-	-	-	Hinge rod
17b Штифт	5011-17	o	o	o	-	-	Hinge rod
17c Штифт	5032-17	-	-	-	o	o	Hinge rod
*18 Прокладки штифта	5000-14	o	o	-	-	-	Hinge rod spacers
18b Шайбы штифта	5011-18	o	o	o	o	o	Hinge rod washer
19 Пружина штифта	5011-19	o	o	o	o	o	Hinge rod spring
20 Опора заднего штифта	5011-20	-	-	o	-	-	Back rod support
21 Задний штифт	5011-21	-	-	o	-	-	Back rod
21b Задний штифт	5032-21	-	-	-	-	o	Back rod
22 Установочный винт	5011-22	-	-	o	-	-	Set screw
22b Установочный винт	5032-22	-	-	-	-	o	Set screw
23 Запирающий установочный винт	5011-23	-	-	o	-	-	Set screw locking
23b Запирающий установочный винт	5032-23	-	-	-	-	o	Set screw locking
24 Резиновая опора	5000-24	o	o	o	o	o	Rubber support
29 Заглушка	5030-29	-	-	-	o	o	Counter plate
30 Крепежный суппорт	5033	-	-	-	o	o	Fast Caliper

ASA SPLIT CAST SYSTEM

25 Крепежные шайбы (уп. 10 шт.)	5000-25	-	-	-	-	-	Cast fastening washers (10 pcs package)
26 Магнит	5000-26	-	-	-	-	-	Magnet
28 Магнитная пластина в сборе	5000-1M	o	o	o	o	o	Complete magnetic plate

* Только для артикуляторов с кодом **5000** и **5010** предыдущей модели

Only for articulators codes **5000** and **5010** previous model

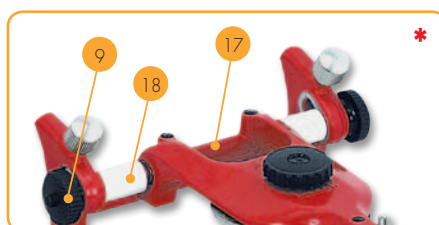

Детали предыдущей модели
Previous model detail

Лицевая дуга и переходной модуль

Face bow and transfer table

Новая лицевая дуга Asa Dental и трансферный столик, применимые к любым артикуляторам Asa Dental мод. 5030 и 5032.
New Asa Dental facebow and transfer table applicable to any of ASA DENTAL articulators models 5030 and 5032.



5020
В комплекте
Complete Set



1
Вставьте блок держателя вилки в дугу.
Insert the fork holder block into the arch.

Инструкции Instructions



2
Вставьте вилку в рот пациента.
Insert the fork into the patient's mouth



3
Вилка введена в рот.
Fork is introduced into the mouth.



4
Раздвиньте в стороны ушные вкладыши и установите лицевую дугу.
Pull the ear olives outwards and insert the facebow.



5
Регулирование позиции в верхненосовой точке, согласно франкфуртскому плану.
Regulate the Nasion position referring to the Frankfurt plan.




6
Соединение штифта держателя вилки и закручивание всех винтов.
Connect the fork holder rod and lock all the knobs.



7
Лицевая дуга установлена.
Facebow installed.



8
Раздвиньте в стороны ушные вкладыши и извлеките лицевую дугу.
Pull the ear olives outwards and extract the facebow.

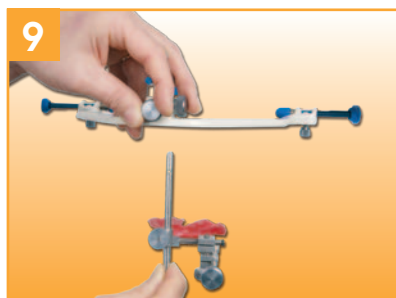

9
Ослабьте винт и отсоедините блок держателя вилки.
Loosen the knob and take away the fork holder block.




10
Поместите блок держателя вилки на переносной столик...
Place the fork holder block into the transfer table...

Лицевая дуга и переходной модуль

Face bow and transfer table




...и закрутите винт.
...and fix the knob.

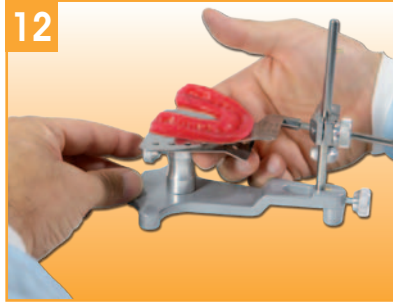


в случае необходимости отрегулируйте высоту
маленькой пластины, затем передвиньте блок
держателя вилки.
*If it is necessary regulate the little plate height;
then remove the fork holder block.*



Поместите гипс на пластину и снова
установите блок держателя вилки.
*Place the plaster on the plate and place again
the fork holder block.*

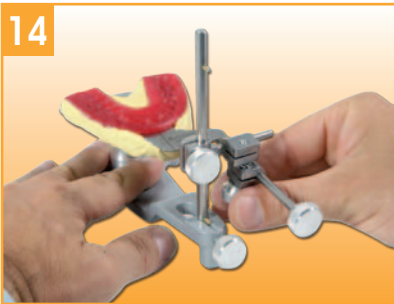

После того, как гипс затвердеет, открутите
винт штифта, соединяющего вилку...
*After plaster hardening release the rod knob
connected to the fork...*

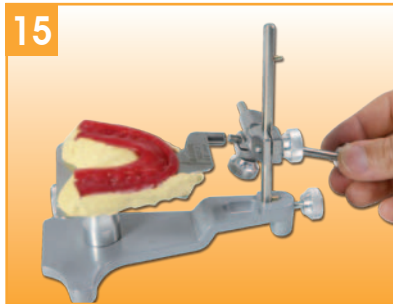

...и извлеките штифт.
...and extract the rod.



открутите винт и извлеките блок
держателя вилки.
*Release the knob and extract the fork holder
block.*



Поместите столик на артикулятор...
Place the table on the articulator...



...в специальные пазы.
...inserting into the special lodges.



закрепите столик на артикуляторе болтами,
идущими в комплекте с артикулятором.
*Fix the table on the articulator with the screw
given with the articulator.*



разместите модель на восковом прикусном
шаблоне.
Place the model on the wax bite.




Наложите гипс на модель...
Put the plaster on the model...



и поднимите "артикуляторную установку"
как обычно.
...end up the "articulator setting" as usual.

Лицевая дуга и переходной модуль

Face bow and transfer table

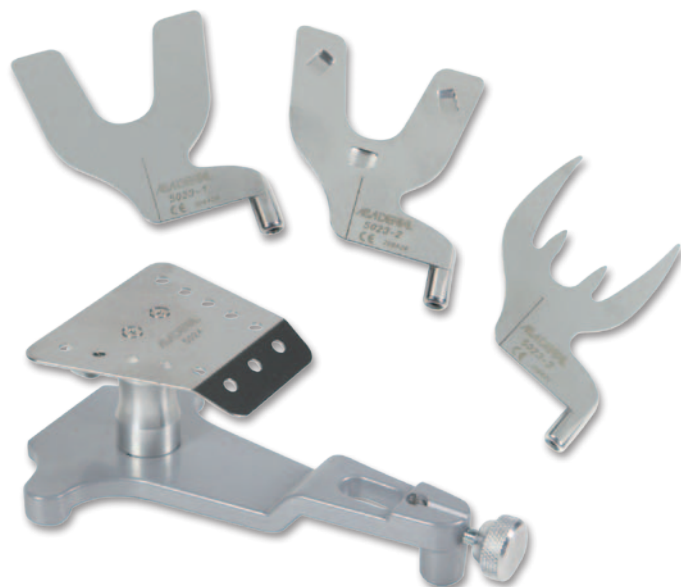


5020

В комплекте - лицевая дуга с 3 вилками, переходной модуль для артикулятора

Complete set including facebow with three forks and transfer table for articulator


Ricambi - Spare Parts

5021

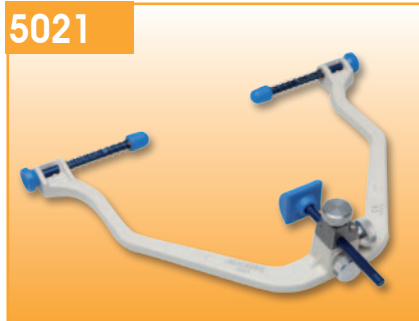

Лицевая дуга
Face bow

5022

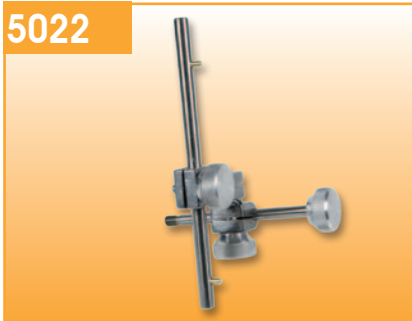

Блок-держатель для вилок
Fork holder block

5024



Переходной модуль
Transfer table

5023-1



Блок
Fork

5023-2



Блок
Fork

5023-3



Блок
Fork