



ООО «КОМПАНИЯ ДЕНТАЛ ГРУПП»
198216, Санкт-Петербург, пр. Ленинский 140, лит. А пом. 7Н, тел (812) 444-88-81
office@dentalgroup-company.ru, www.dentalgroup-company.ru

Мойка VGT-2000

Инструкция по применению



Мойка VGT-2000 предназначена для ультразвуковой очистки и стерилизации инструментов многократного использования. Мойка идеально подходит для очистки маникюрных, педикюрных боров и фрез от мелкой пыли и спрессованных стружек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Размер 200x140x125 мм

Размер бака 155x95x52 мм

Объем 600 мл.

Напряжение питания : 220 В, 50 /60 Гц.

Мощность 35 Ватт

Частота ультразвука 40 кГц

Настройка времени на цифровом дисплее: 3 - 60 минут.

Вес: 905 гр.

Бак из нержавеющей стали с покрытием устойчивым к коррозии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ VGT-2000



ООО «КОМПАНИЯ ДЕНТАЛ ГРУПП»
198216, Санкт-Петербург, пр. Ленинский 140, лит. А пом. 7Н, тел (812) 444-88-81
office@dentalgroup-company.ru, www.dentalgroup-company.ru



ООО «КОМПАНИЯ ДЕНТАЛ ГРУПП»
198216, Санкт-Петербург, пр. Ленинский 140, лит. А пом. 7Н, тел (812) 444-88-81
office@dentalgroup-company.ru, www.dentalgroup-company.ru

1. Открыть крышку и наполнить резервуар водой. Внимание: работа прибора без воды не допускается!
 2. Погрузить инструменты полностью в воду при этом уровень воды должен не превышать отметки максимума.
 3. Закрыть крышку и включить прибор в сеть.
 4. Нажать кнопку «ON». Красный индикатор и легкий шум говорят о работе прибора.
 5. По окончании 3-х минут мойка прекратит работу автоматически. При необходимости процесс можно повторить, нажав кнопку «ON». Кроме автоматического отключения предусмотрено отключение при помощи кнопки «OFF».
 6. По окончании стерилизации отключить шнур от сети, открыть крышку и достать инструменты.
- Грязную воду необходимо вылить из резервуара.

СПОСОБЫ ЧИСТКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОЙКИ

1. Основная чистка. Используется простая вода.
2. Улучшенная чистка. При сильном загрязнении в воду добавляется 5-10 мл. моющего средства.
3. Чистка по частям.
4. Интенсивная чистка. Основная чистка, затем улучшенная в течение 3-х минут.

Стерилизатор ультразвуковой VGT- 2000 предназначен для предварительной очистки металлического инструмента перед дезинфекцией и стерилизацией.

ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОЙКИ

- Быстро и эффективно очищает, как косметический инструмент, так и ювелирные изделия, зубные протезы, оправы и линзы, мелкие столовые изделия.
- Абсолютно безопасен для инструментов любого типа.
- Очистка даже самого загрязненного предмета займет не более 10 минут.
- Встроенный таймер с обратным отсчетом времени позволяет задать индивидуальные параметры.
- Специальная съемная подставка внутри ультразвуковой ванны легко вынимается и моется отдельно от прибора.

Прибор используется только для очистки металлических изделий: ювелирные украшения очки в металлической оправе водонепроницаемые часы с металлическими браслетами



ООО «КОМПАНИЯ ДЕНТАЛ ГРУПП»
198216, Санкт-Петербург, пр. Ленинский 140, лит. А пом. 7Н, тел (812) 444-88-81
office@dentalgroup-company.ru, www.dentalgroup-company.ru



ООО «КОМПАНИЯ ДЕНТАЛ ГРУПП»
198216, Санкт-Петербург, пр. Ленинский 140, лит. А пом. 7Н, тел (812) 444-88-81
office@dentalgroup-company.ru, www.dentalgroup-company.ru

электробритвы, запасные лезвия для бритв, металлические фрезы, мелкие металлические инструменты (ножницы, пинцеты и т.д.), протезы и т.д. металлическая посуда

Внимание! Не рекомендуется чистить: текстиль, кожу, изделия из дерева, предметы, которые могут потерять цвет. мобильные телефоны не водонепроницаемые часы оправы для очков предметы искусства имеющие острые края.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня приобретения прибора.

В течение этого периода фирма обязуется бесплатно ремонтировать или заменять детали с конструктивными дефектами или дефектами материала.

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и обслуживанием или обычным износом материала; повреждения, нанесенные персоналом не имеющим права на ремонт, ущерб, вызванный случайной поломкой или причиненный при транспортировке.

Ремонт или замена, покрываемые гарантией должны производиться исключительно фирмой-производителем или ПРОДАВЦОМ, а все транспортные издержки покрывает.



ООО «КОМПАНИЯ ДЕНТАЛ ГРУПП»
198216, Санкт-Петербург, пр. Ленинский 140, лит. А пом. 7Н, тел (812) 444-88-81
office@dentalgroup-company.ru, www.dentalgroup-company.ru